

# FICHA TÉCNICA

## DETERGENTE DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO

### *LINEA MULTIPROPÓSITO*

DinMed



**Comercializador:** DinMed S.A.S  
**Fabricante:** Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S  
**Registro Sanitario:** 2021DM-0024589  
**Fecha de vencimiento registro sanitario:** 18/11/2031  
**Riesgo:** IIA  
**Vida útil:** 24 meses.  
**Presentación:** 750 ml y 4000 ml.

#### **Descripción:**

Detergente desinfectante de nivel intermedio al 2% listo para usar (RTU) de gran efectividad, formulado especialmente para la limpieza de superficies y equipos en consultorios odontológicos, clínicas veterinarias, centros de estética y otros establecimientos que requieran desinfección de nivel intermedio, contiene amonios cuaternarios de quinta generación, reforzado con alcohol etílico y enzima proteasa alcalina. Está especialmente diseñado para realizar una profunda limpieza, desinfección, desodorización e higienización, contiene inhibidores de corrosión para la protección de elementos metálicos como equipos, mesones y superficies, es compatible con elementos de caucho y plástico, no los daña ni decolora.

Elimina el virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) Asociada con el SIDA, en superficies y objetos previamente contaminados con sangre y/o fluidos corporales que puedan contener el virus, elimina la bacteria *serratia marcescens*.

#### **Indicaciones:**

Siguiendo las instrucciones correspondientes de aplicación, este producto es ideal para desinfectar áreas con superficies sólidas tales como: paredes, pisos, sanitarios, mesones y sillas en consultorios odontológicos, veterinarias, centros de estética y otras instituciones que requieran desinfección de nivel intermedio,, elimina malos olores generados por la biocarga ya que la enzima proteasa destruye la materia orgánica que se genera en estas por el tráfico de pacientes, sus vapores no son nocivos al ser humano y su baja corrosividad no afecta superficies ni al medio ambiente.

# FICHA TÉCNICA

## DETERGENTE DESINFECTANTE

### DE NIVEL INTERMEDIO

*LINEA MULTIPROPÓSITO*

DinMed

#### Modo de uso:

Utilice el producto puro, no lo disuelva en agua, aplique la solución con un trapo, esponja, trapero o aspersor según sea necesario, humedezca la superficie completamente y deje que permanezca húmeda por mínimo **5 minutos**, después proceda a secar cualquier exceso de líquido, no requiere enjuague.

#### Descarte:

Deseche la solución por los drenajes o sifones.

#### Espectro de acción:

**Bacterias:** Este producto ofrece actividad desinfectante, llenando todos los requisitos hospitalarios, contra los siguientes organismos: Pseudomonas aeruginosa PRD 10, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella Choleraesuis, Streptococcus salivarius, Brevibacterium ammoniagenes, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes y Staphylococcus aureus.

**Virus:** Ofrece actividad virucida contra el VIH-1, Influenza A2/Japón (representativo del resfriado común), Herpes Simplex tipo 1 (causante de las ampollas de fiebre), Adenovirus tipo 2 (causante de infecciones respiratorias) y virus Vaccina (representativo de la viruela), tbc asociado a la tuberculosis.

**Hongos:** Para controlar el mildiu y el moho en superficies duras, no porosas aplique la solución con un trapo, esponja o trapero asegurándose que toda la superficie quede completamente húmeda. Permita que se seque por si solo al contacto con el aire. Repita en intervalos semanales como medida preventiva, o cuando el mildiu reaparezca. Gran capacidad fungicida contra hongos patógenos

#### Composición:

Amonios cuaternarios de quinta generación, alcohol etílico y enzima proteasa alcalina..

# FICHA TÉCNICA

## DETERGENTE DESINFECTANTE DE NIVEL INTERMEDIO

### LÍNEA MULTIPROPÓSITO

DinMed

#### Condiciones de transporte:

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

#### Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

#### Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas.

No requiere mascarillas de protección, no genera vapores.

No mancha la ropa ni las superficies donde se utiliza.

Para más información consultar la FDS.

**Nota:** El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

Utilizar puro, producto listo para usar.

