

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INSTRUMENTAL

LÍNEA MULTIPROPÓSITO

DinMed

Comercializador: DinMed S.A.S
Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S
Registro Sanitario: No requiere 2017018366
Vida útil: 24 meses.
Presentación: 120 g.



Descripción:

Crema limpiadora, desincrustante y desmanchadora de instrumental quirúrgico y autoclaves para uso en consultorios odontológicos, veterinarias, centros estéticos, entre otros.

Contiene abrasivos muy suaves que garantizan una profunda y completa limpieza de las superficies donde se aplica, contiene solventes naturales a base de d-limoneno, eliminan óxido, manchas y grasa de forma efectiva.

Especialmente recomendado para la limpieza y desmanchado de todo tipo de instrumental de tipo metálico, disuelve residuos minerales y grasos causados por aguas duras, elimina manchas amarillas en el instrumental debido a la exposición continua al calor en máquinas esterilizadoras, elimina óxido en material viejo y desgastado, evita el uso de limpiadores ácidos que son demasiado contaminantes, producen vapores y residuos muy peligrosos y nocivos para la salud.

Indicaciones:

Limpieza y desmanchado de instrumental metálico, se puede utilizar para eliminar residuos minerales en cámaras de máquinas esterilizadoras, limpieza de mesones en acero inoxidable, no se debe utilizar sobre superficies plásticas o pintadas.

Modo de uso:

Aplicarse una pequeña cantidad, frote con esponjilla de nailon, cepillos metálicos o de plástico, remueva el exceso con toallas de papel y enjuague con agua.

Disposición final:

Ninguno. 100% Biodegradable..

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINCRUSTANTE PARA INSTRUMENTAL

LÍNEA MULTIPROPÓSITO

DinMed

Condiciones de transporte:

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas.

No requiere mascarillas de protección, no genera vapores.

Para más información consultar la FDS.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

