

FICHA TÉCNICA

BIOQUAT RTU

LINEA HOSPITALARIA



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S

Registro Sanitario: 2021DM-0024589

Fecha de vencimiento del registro sanitario: 18/11/2031

Clasificación de riesgo: IIA

Vida útil: 24 meses.

Presentación: 750 ml spray / pistola espumadora.

Descripción genérica: Detergente desinfectante nivel intermedio a base de amonios cuaternarios.

Descripción:

Es un detergente desinfectante germicida de uso profesional de pH neutro, con amplio espectro a base de amonios cuaternarios de quinta generación reforzados con alcohol; formulado para ser usado en la desinfección de nivel intermedio para áreas, superficies, instrumental y equipos, contiene agente antioxidante que protege los dispositivos y elementos metálicos. Gracias a su amplio espectro de acción es un virucida, fungicida y bactericida, de gran efectividad, su poder es efectivo desde el primer minuto de contacto. No es tóxico, ni irritante, libre de fosfatos. Acción rápida y listo para usar.

Formulado para ser usado en hospitales, clínicas y laboratorios, elimina el virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) asociado con el SIDA, en superficies y objetos previamente contaminados con sangre y/o fluidos corporales que puedan contener el virus.

Mecanismo de acción:

Limpia, desinfecta y es efectivo en la eliminación de una amplia gama de microorganismos dentro de las cuales se encuentran:

Pseudomona aeruginosa, Salmonella Choleraesuis, Aspergillus Níger, Staphylococcus Aereus, Herpes simples Type 2, Escherichia Coli, Streptococcus pyogenes, Haemophylus Influenzae, Bacilo Subtilis, Salmonella typhimurium, esporas de Bacillus stearotermophylus, Listeria monocytogenes, Candida albicanz , VIH 1 y el covid-19 (Coronavirus).

Composición:

Amonios cuaternarios de quinta generación, alcohol etoxilado y fragancia.

FICHA TÉCNICA

BIOQUAT RTU

LINEA HOSPITALARIA



Indicaciones:

Es ideal para desinfectar superficies sólidas tales como: paredes, pisos, lavaderos, sanitarios, mesas, sillas, etc. En áreas grandes como salas de cirugía, salas de recuperación, salas de procedimientos, consulta externa, recepciones, zonas de espera, baños, entre otros. También puede usarse para dispositivos médicos y equipos biomédicos que requieran desinfección de nivel intermedio, es compatible con todos los materiales (vidrio, metales, plástico, caucho, cerámica). Esta formulación ofrece una profunda limpieza y completa desinfección.

Modo de uso:

Aplicar directamente sin diluir, mediante la pistola de doble acción (espumadora o spray) que contiene el envase, sobre la superficie o sobre un paño limpio, frotar o esparcir el producto garantizando el tiempo de contacto **mínimo de 3 minutos** realizando barrido desde lo más limpio a lo más sucio.

Producto de baja toxicidad en presentación lista para usar (RTU), no requiere enjuague y su suave fragancia residual proporciona un ambiente agradable y limpio.

Descarte: Es 100 % ecológico y biodegradable, no necesita inactivarse y puede ser desechado directamente en drenajes y cañerías.

Propiedades:

PROPIEDAD	VALOR	PROPIEDAD	VALOR
Efectividad en agua	Excelente	Solubilidad en agua	100%
Principio activo	3 %	Apariencia	Líquido
pH	7.00 ± 2.00	Espuma	Baja
Detergentes	Medios	Color	Amarillo fluorescente
Fosfatos	Ninguno	Olor	cítrico
Biodegradable	N/A	USDA	D - 2
Tiempo medio de vida	2 años	EPA	9367-FL-1

FICHA TÉCNICA

BIOQUAT RTU

LÍNEA HOSPITALARIA

DinMed

Precauciones:

Utilizar los elementos de protección personal como gafas, guantes y tapabocas

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

No diluir el producto.

