

FICHA TÉCNICA

ESPORIMED

LINEA HOSPITALARIA



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S

Registro Sanitario: 2021DM-0024612

Fecha de vencimiento del registro sanitario: 22/11/2031

Clasificación de riesgo: IIA

Vida útil: 24 meses estable en almacén

Presentación: Galón X 4000 ml

Descripción genérica: Desinfectante de alto nivel

Características:

Es un germicida de gran eficacia, su poder bactericida, esporicida, virucida y fungicida es efectivo desde el primer minuto de contacto contra una amplia gama de microorganismos, entre las cuales se destacan; Clostridium perfringens, Clostridium difficile, bacterias anaeróbicas Gram-positivas, capsuladas, esporuladas, Bacillus subtilis, Aspergillus Brasillensis, entre otros, estos microorganismos tienen la habilidad para formar resistentes endosporas, permitiéndoles tolerar condiciones ambientalmente extremas y son causantes de enfermedades infecciosas oportunistas implicadas principalmente en infecciones nosocomiales.

Esta formulación **no** contiene fosfatos, es libre de aldehídos y está especialmente diseñada para realizar una **alta desinfección** en dispositivos médicos y equipos biomédicos.

Descripción:

Es una solución desinfectante lista para usar (RTU), a base de amonios cuaternarios de quinta generación y ácidos peracéticos.

Se recomienda usar en todo tipo de instrumentos incluidos los termosensible. ESPORIMED no requiere de activación, es reutilizable y dura hasta 21 días, no contiene vapores peligrosos, no es corrosivo.

Espectro de acción:

Bacterias: Mycobacterium tuberculosis var, Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter Aerogenes, Enterococcus faecales, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella paratyphi, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Stretptococcus pyogenes.

Hongos: Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophites.

Esporas: Bacillus subtilis, Clostridium sporogenes, Clostridium tetani, clostridium difficile.

Virus: Hepatitis A, Herpes Simplex, VIH, Influenza A2, Poliovirus tipo 2, Rinhovirus tipo 39, Rotavirus.

FICHA TÉCNICA

ESPORIMED

LINEA HOSPITALARIA



Indicaciones:

ESPORIMED es útil en la desinfección de alto nivel de dispositivos médicos, instrumental quirúrgico y equipos en el sector hospitalario, odontológico, y afines.

Modo de uso:

Vierta el contenido de ESPORIMED en una cubeta con tapa, rotule el recipiente con la fecha de inicio de uso de la solución.

Utilizar puro, No diluya el ESPORIMED con agua.

Durante el transcurso de los 21 días de utilización, valide con las tiras reactivas indicadoras, que al sumergirlas en la solución viren de color amarillo a verde agua marina (ver imagen de referencia), en caso de que la tira no vire correctamente, reemplace el producto; esto puede ocurrir si los materiales reprocessados a desinfectar no han sido bien lavados anteriormente, se recomienda lavar los dispositivos médicos con Medizyme Fast® detergente multi enzimático.

Sumerja los dispositivos médicos limpios y secos en la cubeta con ESPORIMED, deben quedar cubiertos totalmente por la solución. Garantice tiempo mínimo de contacto de 5 a 20 minutos según clasificación Spaulding del dispositivo médico..

- **Dispositivos médicos semicríticos:** para dispositivos médicos que entran en contacto con piel no intacta o mucosas como por ejemplo endoscopios, colonoscopios, equipos de respiración, laringoscopios, otoscopios, equipos de terapia respiratoria, entre otros, deben ser desinfectados con ESPORIMED por tiempo un mínimo de 5 minutos.
- **Dispositivos médicos críticos:** para dispositivos médicos que entran en contacto con cavidades estériles del organismo incluido el sistema vascular, deben procesarse en ESPORIMED por un tiempo mínimo de contacto de 20 minutos, y enjuagarse idealmente con agua destilada.

Periodo de uso: El tiempo de estabilidad del producto es de 21 días, una vez depositado en el recipiente con tapa.

Descarte: Es 100 % ecológico y biodegradable, no necesita inactivarse y puede ser desechado directamente en drenajes y cañerías.

FICHA TÉCNICA

ESPORIMED

LINEA HOSPITALARIA



Viraje del indicador de chequeo de actividad esporicida:
De amarillo a verde aguamarina.



Precauciones:

El producto **no se debe diluir**.

Evite el contacto directo con los ojos y mucosas. En caso de contacto lavar con abundante agua.

No ingerir ni inhalar.

Utilice los elementos de protección personal (EPP).

En caso de reacción adversa en contacto con la piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

No diluir el producto.