

FICHA TÉCNICA

INSTRUGLO L

LINEA HOSPITALARIA



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Laboratorio Orgánica Biotech S.A.S

Registro Sanitario: No requiere 2017018793.

Fecha de vencimiento del registro sanitario: N/A

Clasificación de riesgo: N/A

Vida útil: 24 meses.

Presentación: Galón X 4000 ml

Descripción genérica: Desincrustante para quirúrgico. instrumental.

Descripción:

Es un limpiador y desmanchador soluble en agua formulado con ácidos naturales diseñados para renovar todo tipo de material e instrumental médico quirúrgico metálico. Remueve residuos minerales, oxido y manchas generadas por aguas duras y continua exposición al calor de autoclaves, contiene inhibidores de corrosión que ayudan a prolongar la vida útil de los instrumentos, es rápido y fácil de utilizar, mantiene los instrumentos en buenas condiciones y con el uso continuo se obtienen grandes resultados en materia de ahorro al prolongar la vida útil de los instrumentales.

Ingredientes activos: Mezcla de acidos organicos, detergente no ionico propilenglicol.

Propiedades:

- Color: Transparente.
- Fragancia: N/A.
- Biodegradabilidad: 100% biodegradable.

Modo de uso:

Diluya 150 ml por litro de agua, sumerja de 10 a 15 minutos máximo, después de preparado su tiempo de durabilidad es de 30 días. Para maquina termolavadora utilice 40 ml por litro de agua.

Descarte: Es 100 % ecológico y biodegradable, la solución puede ser desechada directamente en drenajes y cañerías.

FICHA TÉCNICA

INSTRUGLO L

LINEA HOSPITALARIA



Indicaciones:

Esta indicado para desincrustar instrumentos de acero inoxidable y titanio. Previene la corrosión elimina manchas y óxido, revitaliza el acabado original del instrumento.

Este producto solo debe ser utilizado en instrumentos de acero quirúrgico, tungsteno, y titanio, no se recomienda en cromo vanadio y aluminio.

Precauciones:

Manténgase alejado de los niños, producto de uso industrial hospitalario, para su manipulación utilice gafas de protección, guantes y delantal plástico, manténgase almacenado en un sitio fresco.

Producto acido remítase a LA FDS para más información.

No se recomienda la utilización del producto de forma pura..

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.

- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar (iluminación artificial preferiblemente).

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

Nota: El inadecuado cumplimiento de los parámetros de conservación del producto puede afectar el funcionamiento.

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.

No usar puro.

